





- 仰向けになって治療してください。
- 治療と治療の間は1時間以上あけてください。

導子極板AC (青色マークバンド) → 青AC
 導子極板AC (赤色マークバンド) → 赤AC
 導子極板YD (青色マークバンド) → 青YD
 導子極板YD (赤色マークバンド) → 赤YD

両手と両足

手背に導子極板 AC、手掌に導子極板 YD、両足の甲に導子極板 YD をあてた状態。

[手]

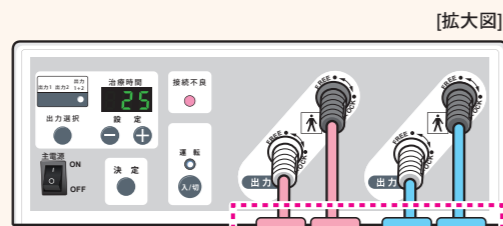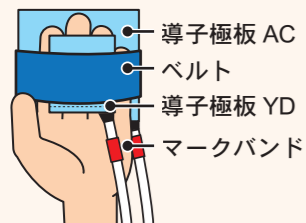

赤色、青色マークバンド

導子極板のマークバンドの色は出力1、出力2のどちらに赤、又は青を挿入しても構いませんが、導子極板 AC と導子極板 YD のマークバンドの色は必ず揃えてください。

[足]



足の甲、裏どちらにあててもかまいません。(フィットする方にあててください。)

出力1 + 2 基本のあて方 [両手と両足]

出力1 または 出力2 基本のあて方 [片手と片足]

出力選択ボタンを押して「出力1」または「出力2」を選択して下さい。
 ※図は「出力1」を設定した場合

頭痛・不眠症のあて方 後頸部と片手と両足

5 cm ~ 15 cm 位あける

肩こりのあて方 肩と片手と両足

5 cm ~ 15 cm 位あける

慢性便秘のあて方 下腹部と片手と両足

5 cm ~ 15 cm 位あける